

Strumenti diamantati per Sgrossatura , Rifinitura e **GLASATURA** della ceramica a freddo.Sono composti da grani di diamanti puro legati a uno speciale silicone tenace ed elastico .I tre passaggi garantiscono un elevato grado di rifinitura e brillantatura estetica riducendo il numero di cotture in forno.
Consigliamo di effettuare tutti e tre i passaggi ad una velocità massima di 5000 rpm praticando una leggera pressione sul pezzo con movimenti circolari . I gommini sono montati su supporto di acciaio perfettamente concentrici . Una velocità o pressione eccessiva potrebbe provocare un surriscaldamento sia dello strumento che del manufatto da trattare.

Per molatura e asportazione della ceramica e metalli

1° Passaggio
Sgrossatura
Blu-Giallo
Velocità: Rpm
1000 - max 5000



Diam. Ø x h mm / forma	26X2 Lenticolare	4X13 Fiamma	11x2 Ruotina	17x2,5 Ruota
CODICE: GEK..	GL	GF	GR	GR1
Iso 803 104	303 534 260	300 534 040	044 534 110	372 534 170

Prelucidatura di ceramica e metalli

2° Passaggio
Prelucidatura
Rosa-Giallo

Velocità: Rpm
1000 – max 5000



Diam. Ø x h mm / forma	26X2 Lenticolare	4X13 Fiamma	11x2 Ruotina	17x2,5 Ruota
CODICE: GEK..	MFL	MFF	MFR	MFR1
Iso 803 104	303 524 260	300 524 040	044 524 110	372 524 170

Lucidatura a specchio della ceramica senza glasatura, indicato anche per metalli.

3° Passaggio
Brillantatura / Glasura
Grigio-Giallo
Velocità: Rpm
1000 - max 5000




Diam. Ø x h mm / forma	26X2 Lenticolare	4X13 Fiamma	11x2 Ruotina	17x2,5 Ruota
CODICE: GEK..	FL	FF	FR	FR1
Iso 803 104	303 514 260	300 514 040	044 514 110	372 514 170

GEK SET

Cf 6 Gommini diamantati
+ 1 Pietra Diamantata

Composto da:

GEK.. GL / MFL / FL
GEK.. GF / MFF / FF
PD10E

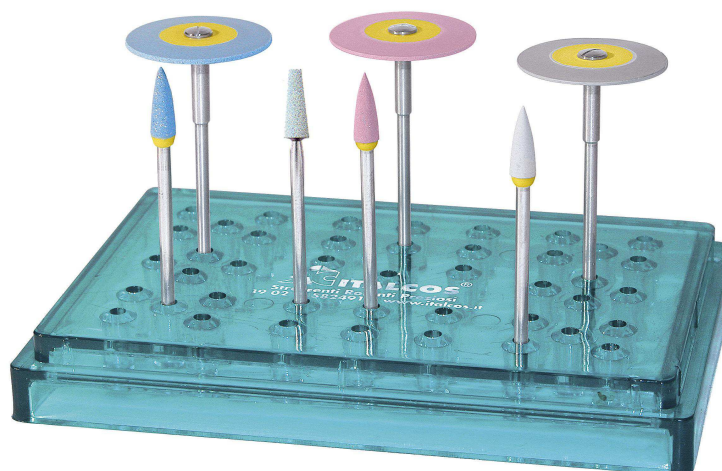


Mandrini



Diam. Ø 1/10 mm	050	060	023	050	042	020	030
CODICE:	M57E	M FDP	MGO	MGO277	MCA4013	M020	MMIN
Iso 330 104	604 391 050	615 422 060	610 418 023	610 415 050	622 444 042	612 432 020	612 432 030

Riduttori

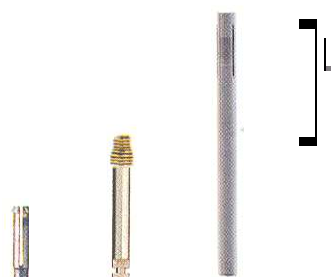

	Da HP a FG	Da RA a FG	Da HP a FG
Diam. Ø 1/10 mm – L mm	2.35 mm	2.35 mm	2.35 mm-35
CODICE:	R 208	R 210	R 216
Iso 330	104 612 391 023	204 602 436 016	104 612 391 023

Feltrini Diamantati

Grana :Ultrafine Rifinitura
Ceramica e compositi

Rpm: 1/3000 max

DIA 229 con pasta
DIA 153 senza pasta



Diam. Ø x h mm /forma	12X3 Ruota	17X3.5 Ruota
CODICE:	DIA 229	DIA 153
Iso 070 104	372 491 120	372 491 150

Dischi di Plastica Abrasivi

Un lato abrasivo.

Per Rifinire e
contornare compositi e
resina



Grana	Mandrino per FDP	● Media	● Fine	● Ultra Fine
Diam Ø 1/10 mm / h mm		220 / 0.30	220 / 0.30	220 / 0.30
CODICE:	M FDP	FDP 22 M	FDP 22 F	FDP 22 XF